

CAPACITACIÓN EXTRA

LABORATORIO DE LA
LICITACIÓN NACIONAL
DE ORINA



CONOCEMOS EL VALOR
DE CUIDAR LA VIDA
DE LOS COSTARRICENSES




cobas u 411

Software

Software

Botones de acción globales

- También llamadas **Teclas de función globales**.
- Los botones de acción globales muestran los estados operativos.
- Pueden ser usados para operar directamente funciones(ingreso manual del operador presionando botones).

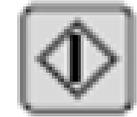

Start



Stop



Alarm



Line feed

Software

Botones de acción globales

Inicio



El LED de este botón se ilumina **verde** cuando el analizador está listo para operar.

Parada



El LED de este botón se ilumina **rojo** cuando ocurre un error de sistema y el analizador no puede continuar operando, o cuando el operador presiona manualmente este botón.

- ▶ El análisis se detiene inmediatamente.
- ▶ Todas las tiras en la bandeja de tiras reactivas son desechadas en el área de desechos.
- ▶ Las correspondientes muestras, controles, y calibradores son borrados.

Software

Botones de acción globales

Alarma



La luz LED de este botón se ilumina cuando una alarma ha sido activada. Se ilumina **amarillo** o **rojo**, dependiendo de la severidad de la alarma.

- **Advertencia** (por ejemplo, los desechos han alcanzado 90 tiras reactivas)
- **Error** (dependiendo del error, el analizador cambia el estado operativo a “Parada”. El problema debe ser solucionado antes de continuar con el análisis).

Monitor de Alarmas: Alarmas y advertencias son registradas para el usuario.

Rastreo de Alarmas: Detalles adicionales sobre errores y advertencias se registran en la pantalla de “Rastreo de Alarmas” (solamente accesible para supervisores).

Software

Botones de acción globales

Alimentación



Presione este botón para mover el papel de la impresora hacia adelante (esta función no está disponible mientras el analizador se encuentra en estado de operación).



EQ

EQUITRON, S.A.

Gracias * Thank You.



Daniel Chaverri Quesada



2233-2316



daniel.chaverri@equitron.com



www.equitron.com



CONOCEMOS EL VALOR
DE CUIDAR LA VIDA
DE LOS COSTARRICENSES